

INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z POLICZKA

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu wysyłkowego:

- Sterylna pałeczka w probówce do wymazów – 2- 4 szt.
- Koperta do zabezpieczania wymazów „Hagmedpack” – 2- 4 szt.
- Wkład wysuszający – 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe - 2 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.
- Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.
- Koperta zwrotna – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:

- Co najmniej na **1 godzinę** przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.
- Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp. W przypadku dzieci dopuszczalny jest smoczek (tzw. smoczek z kółeczkiem) pod warunkiem używania go wyłącznie przez jedno dziecko (nie np. przez matkę i dziecko lub więcej niż jedno dziecko).

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem krwi należy koniecznie wykonywać w ochronnych rękawiczkach lateksowych.

1. Opisać wymazówki i kopertę „Hagmedpack” imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania wymazu.
2. Otworzyć opakowanie i wyjąć wymazówkę z probówki ochronnej.



Uwaga! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.

3. Wymaz pobrać poprzez płynne pocieranie końcem wymazówki wewnętrznej strony obu policzków.



Uwaga! U dzieci nabłonek jamy ustnej złuszcza się w dużo większym stopniu (dostosowanie siły i czasu pocierania).

4. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce ochronnej.



5. Zabezpieczoną wymazówkę należy następnie umieścić w opisanej kopercie „Hagmedpack” i zakleić kopertę.
6. Powyższą procedurę powtórzyć z kolejną wymazówką. Każdą wymazówkę umieścić w oddzielnej kopercie.
7. **Do czasu transportu wymazówki przechowywać lodowce w temp. 2-8°C.**



NIE ZAMRAŻAĆ!

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 5 dni. Podczas transportu, pobrany wymaz nie wymaga chłodzenia.

8. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”:
 - a. podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia;
 - b. wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola;
 - c. **uwaga! podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.**
9. Próbkę do badań umieścić w kopercie z wkładem pęcherzykowym wraz z wypełnionym formularzem zlecenia (opatrzonym podpisem osoby poddanej badaniu).

**W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta Alior Bank:
69 2490 0005 0000 4520 1414 0407**

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.